

## Turinys

Du sterilūs minkšti kontaktiniai lęšiai dieniniam nešiojimui, metafilkon A 45 %, vanduo 55 %, 0,9 % buferiniame druskos tirpale.

## Naudojimo instrukcija (Paskirtis)

Skirti tiek emetropijos, tiek ir refrakcinės ametropijos korekcijai fakinėse ir afakinėse, nepažeistose ligų, asmenų akyse.

## Lęšio įdėjimas

1. Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir nusauskinkite jas nepūkuotu rankšluosčiu. Kruopščiai nuskalauti lęšį, rekomenduotina su FreshKon® daugiafunkciniu tirpalu.
2. Padėkite lęšį ant smiliaus galo. Įsitinkinkite, kad lęšis yra dubenėlio formos ir nėra išvirškščias.



3. Kitos rankos pirštu stipriai pakelkite viršutinį akies voką.



4. Su vienu iš lęšių dedančios rankos pirštų patraukite žemyn apatinį voką ir atsargiai uždėkite kontaktinį lęšį ant ragenos.



5. Lėtai atleiskite viršutinį voką ir švelniai užsimerkite.



6. Tuos pačius žingsnius pakartokite su kita akimi.

### Lęšių išėmimas

1. Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir nusausinkite jas nepūkuotu rankšluosčiu.
2. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad lęšis yra ant ragenos.
3. Viduriniu pirštu patraukite apatinį voką žemyn.
4. Smiliumi paslinkite lęšį žemyn.
5. Švelniai sugnybkite lęšio kraštus nykščiu bei smiliumi ir išimkite lęšį.




6. Tuos pačius žingsnius pakartokite ir su kita akimi.

### Kasdienis valymas ir priežiūra

1. Išėmę lęšį iš akies, padėkite ant delno ir užlašinkite ant lęšio keletą lašų rekomenduotino FreshKon® daugiafunkcinio tirpalo.
2. Smiliaus pagalvėle švelniai trinkite į delną kiekvieną lęšio pusę apie 20 sekundžių.
3. Kruopščiai nuskalauti lęšį, rekomenduotina su FreshKon® daugiafunkciniu tirpalu.
4. Iki kito naudojimo palikite švarų lęšį mirkti konteineryje, rekomenduotina pripildytame FreshKon® daugiafunkciniu tirpalu.
5. Niekada neskalauskite savo lęšių vandeniu iš čiaupo.
6. Prieš keisdami kontaktinių lęšių priežiūros sistemą, pasitarkite su savo akių priežiūros specialistu.

## Nešiojimo trukmė /Rekomenduojamas keitimo režimas/ Tolimesni vizitai


Nešiojimo trukmė dienos bėgyje.

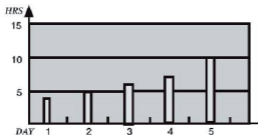

**Pastaba:** pirmą kartą nešiodami kosmetinius kontaktinius lęšius, galite pastebėti miglotą matymą žonuose. Tai yra normalu, nešiojant kosmetinius kontaktinius lęšius. Matymas pagerės po adaptacinio laikotarpio.

1. Niekada nenešiotkite lęšių ilgiau, nei rekomendavo jūsų akių priežiūros specialistas.
2. Praėjus rekomenduojamam nešiojimo laikotarpiui, nešiotus lęšius visada išmeskite, kaip tai nurodė jūsų akių priežiūros specialistas
3. Lęšiai skirti dieniniam nešiojimui ir keičiami kas mėnesį.

### Tolimesni vizitai

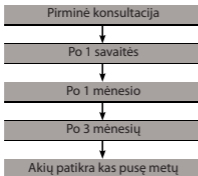

1. Nenaudokite kontaktinių lęšių, jei yra bet kuri žemiau nurodyta problema: (a) Bet kokia akių liga, sužalojimas ar nenormalumas, susijęs su ragena, jungine ar akių vokais (b) Bet kokia aktyvi ragenos infekcija (bakterinė, grybelinė, pirmuoninė ar virusinė) (c) Jei akys paraudonuoja ar yra sudirgintos.
2. Siekiant užtikrinti saugumą, svarbu tinkamai nešioti ir prižiūrėti lęšius ir tinkamai naudotis lęšių priežiūros produktais, įskaitant dėkliukus.
3. Jei patiriate akių diskomfortą, didelį ašarojimą, regos pasikeitimus, akys parausta ar atsiranda kitos problemos, turite nedelsiant išsiimti kontaktinius lęšius ir tuojau pat kreiptis į savo akių priežiūros specialistą. Rekomenduojama reguliariai lankytis pas savo akių priežiūros specialistą, kaip nurodyta.
4. Nenaudokite, jei sterili lizdinė pakuotė yra atidaryta ar pažeista.
5. Visada, kai nenešiojate lęšių, laikykite juos pamerktus į priežiūros tirpalą. Užsitęsę laikotarpiai, kai lęšis yra sausas, sumažina lęšio paviršiaus galimybę grįžti į drėgną būseną.
6. Nešiodami lęšius, venkite kenksmingų ir akis dirginančių garų bei dūmų.
7. Pasikonsultuokite su savo akių priežiūros specialistu dėl lęšių nešiojimo spretuojant.
8. Įsidėkite lęšius prieš makiažą. Į akis ar į lęšius neturi patekti kosmetinių priemonių, losjonų, muilo, kremo, dezodoranto ar aerosolinių garų.
9. Neleiskite kitiems nešioti jūsų kontaktinių lęšių.



CE  
0120



Atspausdinta Lietuvoje  
Peržiūros data: 3/2012  
Peržiūros numeris: MM-IFU(4)

Obelis s.a  
Boulevard General Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM)



Oculus Private Limited  
61 Tai Seng Avenue,  
#05-12,  
Singapore 534167

# FreshKon®

Dažno keitimo kosmetiniai kontaktiniai lęšiai

**FreshKon® Alluring Eyes • FreshKon® Mosaic  
FreshKon® Colors Fusion • FreshKon® Dezigner**

## **Saugaus kontaktinių lęšių nešiojimo vadovas (Naudojimo instrukcija)**

Pasitarkite su akių priežiūros specialistu dėl galimybės nešioti.

[www.freshkon.com](http://www.freshkon.com)